




Eirberg

Sími 569 3100
www.eirberg.is

MERCADO
MEDIC


Notkunarleiðbeiningar

Team Lazy salernisstóll fyrir börn

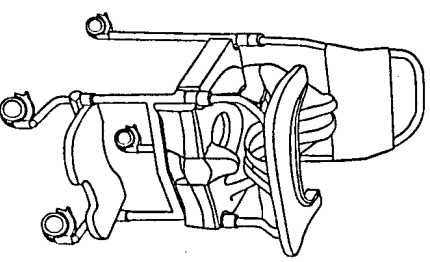


Samsetning

1. Taktu í sundur stólrámmann með hjólunum (1). Athugaðu Að föthvílan (2) vísí framávið.
2. Settu plasetuna með gatínu að framan (3) á rammann.
3. Þrýstu þvagrennslisvörminni (4) niður að framan.
4. Skrífaðu bakrörin (5) á rammann.
5. Klæddu bakdukinn (6) yfir bakrörin / aksturshandfangið
6. Athugaðu að öryggisbeltið (7) sé á réttum stað
7. Skrífaðu borðið/bolstuðninginn (8) að framanverðu á stólrámmann..
8. Festu bakbandið (9) við rörið á borðinu í krækjurnar.
9. Athugaðu að öryggisbandið fyrir kálfa (10) sé á sínum stað, annað hvort fest í krækjurnar (11) eða á rörin neðantil en það fer eftir hæð notandans.

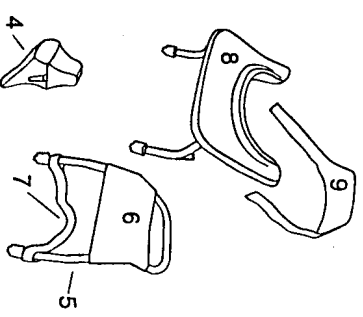

Notkun

1. Bremsaðu öll hjólin og losaðu um boðið / bolstuðninginn á þeirri hlið sem best er að komast að. Ekki taka borðið af, aðeins yta því til hliðar
2. Ef þú getur ekki lyft notandanum yfir þvagrennslisvörmina, taktu hana þá í burtu
3. Stilltu fótplötuna í æskilega hæð og felldu hana síðan upp að rammannum.
4. Settu notandann á setuna og settu þvagrennslisvörmina á sinn stað ef hún hefur verið tekin frá.
5. Ýttu borðinu til baka. Skrífaðu það fast. Láttu notandann halla sér framá borðið.
6. Settu bakbandið við bakið á notandanum og festu það vel á borðið. Bandið verður að veita góðan stuðning.
7. Felldu niður föthvíluna. Settu fætuna á föthvíluna.
8. Stilltu fótplötuna í rétta hæð. Reyndu að hafa hné notandans eins hátt upp við borðið og mögulegt er.
9. Hertu bandið vel yfir fætuna þannig að það veiti góðan stuðning

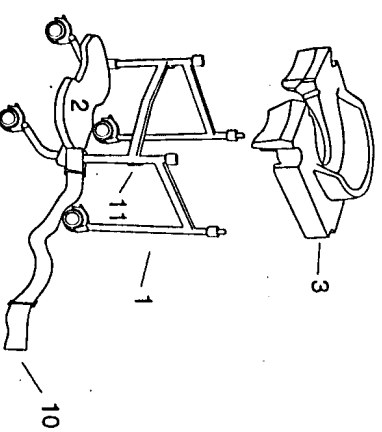

Á salernið.

1. Taktu burtu þvagrenslissvömnina.
2. Renndu Team Lazy stólnum yfir klósetið (bakið fyrst).
3. Settu þvagrenslisrörið þannig að það vísi niður í salernisskálina.
4. Festu öryggisbelti utanum klósettstólinn.

Mikilvægt að athuga !

- Notandinn á aldrei að halla aftur að bakinu (aksturshandfanginu)
- Bakbandið skal af öryggisáæðum alltaf nota.
- Sjáðu till þess að notandinn halli eitið framávið.
- Hjólin skulu alltaf vera í bremsu þegar notandi fer í eða úr stólnum.
- **Aldrei má skilja notandann einan í stólnum án eftirlits.**

Prífi:

- Það má má þvo plastefnið sem er í stuðningsböndunum (bak og kalfaband) í þvottavél á 40°.
- Stólrámminn ryðgar ekki og má þrifa hann með þvottaefni eins og Ajax Express og þurka af honum með þurrum klút á eftir.
- Plastefnið í setu, borði og þvagrenslisrörinu má þvo með vatni upp að 80° heitu. Mikilvægt er þó að setja setuna strax að loknum þrifum á stólrámmannum til þess að forðast skekkju.

<i>Aldur</i>	<i>2- 5 ára</i>	<i>4-10 ára</i>	<i>8 ára –60 kg</i>
Seta (dýptxbreidd)	24x17	37x30	44x36
Borð (hæð frá setu, cm)	19	24	24

Nánari upplýsingar veitir Eirberg ehf., Stórhöfða 25, 110 Reykjavík

Sími 569 3100. Fax 569 3101. Netfang : eirberg@eirberg.is.

www.eirberg.is