

MOTION GÖNGUGRIND

NOTENDALEIÐBEININGAR



Stoð hf.
Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565-2885
www.stod.is

Motion göngugrindin er 4ra hjóla göngugrind sem er ætluð til notkunar bæði innan-og utanhúss. Motion er auðveld og örugg í notkun og er ætluð notendum að hámarki 120kg.

Göngugrindin er með sæti og körfu og vegur 6,3kg (grind úr áli).
Karfan ber þyngd að 10kg.
Göngugrindin á alltaf að vera í bremsu áður en sest er á sætið.

Til að leggja grindina saman er sætið slegið upp og þverslánni lyft á eftir og þar með fer grindin saman. Grindina skal brjóta saman áður en hún er flutt niður stiga eða sett í bíl. Motion grindin er sett í stöðubremsu með því að ýta bremsuhandfanginu niður.

Hæð göngugrindarinnar er stillanlegt milli 89-102cm. Hæðin er stillt með því að losa skrúfur á handfangi grindarinnar, handfangið er stillt og skrúfurnar hertar aftur.

Sé göngugrindin óstöðug þarf að yfirfara allar festingar.

Bremsurnar þarf að stilla/herða reglulega; losa þarf róna á stilliskrúfunni og herða.

Þegar grindin er þrifuð skal t.d. nota bílasjampó, skola vel og þurrka.

2ja ára ábyrgð er á Motion göngugrindinni – ábyrgðin fellur úr gildi séu notaðir varahlutir frá öðrum en Pro-Movec.

Motion göngugrind – upplýsingar:

- Vegur 6,3 kg
- Hámarksþyngd notanda: 120 kg
- Breidd 61cm
- Stillanleg handföng 89-102cm
- Bakstuðningur / setbreidd 48cm
- Bólstrað sæti
- 8” hjól
- Bremsur / stöðubremsa
- Auðvelt að leggja saman fyrir flutning
- Karfa fylgir / tekur að hámarki 10kg
- Formuð handföng

Stöðug og örugg göngugrind; létt og auðveld í notkun.

Ef spurningar vakna um notkun og/eða viðhald skal hafa samband við:

Stoð hf.
Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565-2885
www.stod.is